


REGISTRO ANVISA: 81981090014
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tamanhos Disponíveis: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Composição: Policloroprene
Cor: Branca
Certificado de Aprovação (CA): 39.518
Validade: 3 anos da data de fabricação

INDICAÇÃO DE USO

Indicada para procedimentos cirúrgicos com necessidade de proteção do profissional da saúde contra riscos biológicos e químicos, contato com sangue, fluidos corpóreos possíveis de contaminação como também, proteção do usuário e paciente de reações alérgicas causadas pelo látex natural.

DESCRIÇÃO

Luva cirúrgica, confeccionada em borracha sintética (policloroprene), totalmente texturizada, anatômica, estéril, sem pó.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual

ISO 10282:2005 - Luvas estéreis de uso único;

ISO 13485 - Boas práticas de fabricação de produtos médicos


EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (50 Pares)	DUN 14 (200 Pares)
6.0	78982017218662	37898207218663	47898207218660
6.5	78982017218679	37898207218670	47898207218677
7.0	78982017218686	37898207218687	47898207218684
7.5	78982017218693	37898207218694	47898207218691
8.0	78982017218709	37898207218700	47898207218707
8.5	78982017218716	37898207218717	47898207218714
9.0	78982017218723	37898207218724	47898207218721

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s); Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva; Lave as mãos com sabonete antisséptico e seque-as bem, a fim de evitar contaminações cruzadas e descolorações das luvas enquanto em uso; ou realize o procedimento operacional padrão pré-cirúrgico para higienização de partes do corpo antes de sua utilização; Evite o uso de anéis e/ou adornos que possam ocasionar furos e/ou rasgos nas luvas. Em caso de danos e/ou mudanças de atividades, troque imediatamente as luvas, a fim de evitar contaminações cruzadas; Abra a embalagem primária da luva estéril, pela aba, descolando totalmente a parte superior e em seguida as laterais, evitando tocar na parte interna; Deposite o envelope interno em um campo estéril, e em seguida, posicione-se em frente ao móvel a uma distância segura, para que não haja risco de contaminação; Verifique o lado correto de cada luva, então abra o envelope, segurando-o pelas abas centrais, evitando que a parte externa do envelope toque as luvas, para que isso não ocorra, firme os dedos sobre as laterais internas e solte-as quando tiver certeza que ele não voltará a dobrar; Calce a mão dominante, segurando-a pela parte externa da dobra, vista-a calmamente, procurando alocar cada dedo no seu espaço correspondente dentro da luva, pare de calçá-la quando ela estiver no punho, mantendo a dobra; Calce a luva na outra mão, com auxílio da mão já vestida, segure-a pela parte interna da dobra e delize a mão para dentro da luva. Pare quando a dobra estiver desfeita, prestando atenção para evitar o contato da parte estéril da luva no antebraço; Corrija o posicionamento dos dedos da mão em ambas luvas. Desfaça a dobra da outra mão com segurança, sem encostar a parte estéril da luva no antebraço; Para retirá-las, inicie pela mão dominante, pegue uma luva próximo ao seu punho em direção à ponta dos seus dedos até que a luva se dobre; Pegue cuidadosamente a dobra e puxe em direção às pontas dos dedos. À medida que puxar, você estará colocando a luva ao avesso; Continue puxando a dobra até que a luva esteja quase que totalmente removida. A fim de evitar contaminação do ambiente, continue a segurar a luva removida. A seguir, remova sua mão da luva completamente; Escorregue o dedo indicador da mão sem luva por baixo da luva que permanece. Continue a inserir seu dedo em direção à sua ponta até que quase metade do dedo esteja sob a luva; Gire seu dedo a 180° e puxe a luva ao avesso em direção à ponta dos seus dedos. À medida que fizer isso, a primeira luva será contida dentro da segunda luva. O lado interno da segunda luva também será virada ao avesso; Pegue as luvas firmemente por meio da superfície não-contaminada (o lado que estava inicialmente tocando sua mão). Libere totalmente o contato com a primeira luva removida; A seguir retire sua segunda mão do contato com as luvas descartando-as adequadamente, conforme instruções de descarte de produtos infectados e/ou normas de saneamento da sua empresa ou hospital.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Produto de uso único; Destruir após o uso; Proteja esse produto do calor, umidade e da luz; Proibido reprocessar; Estéril, enquanto a embalagem não for aberta e/ou danificada; Esterilizada por irradiação; Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil da luva; O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos friccionando-as com preparações alcoólicas ou com sabão antisséptico e água.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.