


Validade: 5 anos da data de fabricação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tamanhos Disponíveis: 6(EP), 7(P), 8(M), 9(G)
Composição: Látex Natural
Cor: Natural
CA 41.782 - Registro ANVISA: 81981090010
CA 44.421 - Registro ANVISA: 81981090011
INDICAÇÃO DE USO

Indicado para proteção das mãos de trabalhadores da saúde durante procedimentos não cirúrgicos como contato potencial com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções e objetos visivelmente sujos com fluidos corporais, em hospitais, laboratórios clínicos, clínicas estéticas, consultórios odontológicos.

DESCRIÇÃO

Luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em borracha natural, lisa, ambidestra, tipo 1, não estéril, com pó.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

Esta luva de proteção é fabricada conforme a norma

ABNT NBR ISO 11193-1:2009 - Equipamento certificado junto ao **INMETRO**

com base na portaria **Nº 332**, de 26 de junho de 2012, e portaria **Nº 451**, de 31 de agosto de 2012.


EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	EAN13 (Inner com 100 peças)	DUN 14 (Caixa com 10 inners)
6 (EP)	7898619335551	17898619335558
7 (P)	7898619335568	17898619335565
8 (M)	7898619335575	17898619335572
9 (G)	7898619335582	17898619335589

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s); Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva; Evite o uso de anéis e/ou adornos que possam ocasionar furos e/ou rasgos na luva; Lave as mãos com sabonete antisséptico e seque-as bem, a fim de evitar contaminações cruzadas e descolorações das luvas enquanto em uso; Verifique se as luvas não possuem furos e/ou sujidades e se o tamanho da luva está de acordo com sua mão; Para calçá-la, retire uma peça de luva de sua caixa original, tocando apenas uma área restrita da superfície da luva, correspondente à região do punho, calce-a cuidadosamente. Retire a segunda peça da caixa com a mão sem luva e toque apenas na região do punho; A fim de evitar contato com a pele do antebraço com a mão já calçada, dobre a parte externa da luva a ser calçada nos dedos dobrados da mão calçada, permitindo o calçamento da segunda luva; Após calçamento de ambas, as mãos não devem tocar nada que não esteja definido pelas indicações e condições de trabalho. Para retirá-la, puxe-a próximo ao seu punho em direção à ponta dos seus dedos até que a luva se dobre, pegue cuidadosamente a dobra e puxe em direção às pontas dos seus dedos, colocando-a do avesso, continue puxando-a até que a luva seja totalmente removida; Para a remoção da outra luva, escorregue o dedo indicador da mão sem luva por baixo da luva que permanece, continue a inserir seu dedo em direção à sua ponta até que, quase metade do dedo esteja sob a luva; Gire seu dedo a 180° e puxe-a ao avesso em direção à ponta dos dedos. À medida que fizer isso, a primeira luva retirada será contida dentro da segunda, o lado interno da segunda luva também será virada do avesso; Pegue as luvas firmemente através da superfície não-contaminada e descarte-as adequadamente. Em seguida, realize a higiene das mãos com preparação alcoólica ou com água e sabonete antisséptico.

Luvas confeccionadas em látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Produto de uso único; Destruir após o uso; Proteja esse produto do calor, umidade e da luz; Proibido reprocessar; Estéril, enquanto a embalagem não for aberta e/ou danificada; Esterilizada por irradiação; Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil da luva; O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos friccionando-as com preparações alcoólicas ou com sabão antisséptico e água.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.