


**REGISTRO ANVISA: 80189110020**
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
**Tamanhos Disponíveis: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5**
**Composição: Látex Natural**
**Cor: Natural**
**Certificado de Aprovação (CA): 41.783**
**Validade: 5 anos da data de fabricação**
**INDICAÇÃO DE USO**

**Indicada para proteção das mãos de trabalhadores da saúde contra riscos biológicos, durante cirurgias, partos, procedimentos radiológicos invasivos, procedimentos e acessos vasculares (cateteres centrais), preparo de nutrições parentais e agentes quimioterápicos.**

**DESCRIÇÃO**

Luva cirúrgica, confeccionada em borracha natural, texturizada/antiderrapante, anatômica/dedo curvo, tipo 1, estéril, com pó

**NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS**

Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual

**ISO 10282:2005** - Equipamento certificado junto ao **INMETRO**

com base na portaria **Nº 332**, de 26 de junho de 2012, e portaria **Nº 451**, de 31 de agosto de 2012.


**EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS**

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (50 Pares)	DUN 14 (400 Pares)
6.0	7898619335483	17898619335480	27898619335487
6.5	7898619335490	17898619335497	27898619335494
7.0	7898619335506	17898619335503	27898619335500
7.5	7898619335513	17898619335510	27898619335517
8.0	7898619335520	17898619335527	27898619335524
8.5	7898619335537	17898619335534	27898619335531

**INSTRUÇÕES DE USO**

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s); Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva; Lave as mãos com sabonete antisséptico e seque-as bem, a fim de evitar contaminações cruzadas e descolorações das luvas enquanto em uso; ou realize o procedimento operacional padrão pré-cirúrgico para higienização de partes do corpo antes de sua utilização; Evite o uso de anéis e/ou adornos que possam ocasionar furos e/ou rasgos nas luvas. Em caso de danos e/ou mudanças de atividades, troque imediatamente as luvas, a fim de evitar contaminações cruzadas; Abra a embalagem primária da luva estéril, pela aba, descolando totalmente a parte superior e em seguida as laterais, evitando tocar na parte interna; Deposite o envelope interno em um campo estéril, e em seguida, posicione-se em frente ao móvel a uma distância segura, para que não haja risco de contaminação; Verifique o lado correto de cada luva, então abra o envelope, segurando-o pelas abas centrais, evitando que a parte externa do envelope toque as luvas, para que isso não ocorra, firme os dedos sobre as laterais internas e solte-as quando tiver certeza que ele não voltará a dobrar; Calce a mão dominante, segurando-a pela parte externa da dobra, vista-a calmamente, procurando alocar cada dedo no seu espaço correspondente dentro da luva, pare de calça-la quando ela estiver no punho, mantendo a dobra; Calce a luva na outra mão, com auxílio da mão já vestida, segure-a pela parte interna da dobra e delize a mão para dentro da luva. Pare quando a dobra estiver desfeita, prestando atenção para evitar o contato da parte estéril da luva no antebraço; Corrija o posicionamento dos dedos da mão em ambas luvas. Desfaça a dobra da outra mão com segurança, sem encostar a parte estéril da luva no antebraço; Para retirá-las, inicie pela mão dominante, pegue uma luva próximo ao seu punho em direção à ponta dos seus dedos até que a luva se dobre; Pegue cuidadosamente a dobra e puxe em direção às pontas dos dedos. À medida que puxar, você estará colocando a luva ao avesso; Continue puxando a dobra até que a luva esteja quase que totalmente removida. A fim de evitar contaminação do ambiente, continue a segurar a luva removida. A seguir, remova sua mão da luva completamente; Escorregue o dedo indicador da mão sem luva por baixo da luva que permanece. Continue a inserir seu dedo em direção à sua ponta até que quase metade do dedo esteja sob a luva; Gire seu dedo a 180° e puxe a luva ao avesso em direção à ponta dos seus dedos. À medida que fizer isso, a primeira luva será contida dentro da segunda luva. O lado interno da segunda luva também será virada ao avesso; Pegue as luvas firmemente por meio da superfície não-contaminada (o lado que estava inicialmente tocando sua mão). Libere totalmente o contato com a primeira luva removida; A seguir retire sua segunda mão do contato com as luvas descartando-as adequadamente, conforme instruções de descarte de produtos infectados e/ou normas de saneamento da sua empresa ou hospital.

Luvas confeccionadas em látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

**INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO**

Produto de uso único; Destruir após o uso; Proteja esse produto do calor, umidade e da luz; Proibido reprocessar; Estéril, enquanto a embalagem não for aberta e/ou danificada; Esterilizada por irradiação; Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil da luva; O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos friccionando-as com preparações alcoólicas ou com sabão antisséptico e água.

**DURABILIDADE**

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.