

LENÇOL DESCARTÁVEL

Cadastro / Registro M.S.:

Produto Não Regulado pela GGTPS/Anvisa

Modelos

Branco

Indicação de uso

Oferece maior segurança em locais que necessitam de cuidados com limpeza e higiene, o seu uso tem por finalidade formar uma barreira mecânica que impede a passagem de sujidades.

Especificação técnica

Fabricada em 100% polipropileno (não tecido).

Cores: Branca

Gramatura: 16gms

Disponível nos modelos: com elástico

Comprimento: 2metros

Largura: 0,90cm

Validade 5 anos

Descartável e de uso único

Apresentação

Embalagem principal: saco polybag contendo 10 unidades.

Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 50 sacos polybag com 10 unidades cada.

Orientações de Uso

Abra o saco plástico pegue uma unidade de lençol, abra-o inteiramente, fixe em um lado na cama, em seguida fixe o outro lado, então puxe e cubra o comprimento da cama fixando as pontas que faltaram. Após executar o procedimento; retirar e descartar em local apropriado.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”;

Ler atentamente as Instruções de Uso;

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Descartar e não usar quando as embalagens chegarem previamente abertas ou danificadas.

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.

Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Matriz

+55 45 3039 4242

Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

+55 47 3439 2114

BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

medixbrasil.com.br    medixbrasil



Normas técnicas

ISO 13485:2016
RDC 40/2015
RDC Nº665 de 30 de março de 2022

Códigos de Barra

EAN13	EAN14
7898652371721 – Elástico branco	17898652371728

Importado e distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.
CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70
Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil
Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368
Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br
0800 006 3036

Revisão 01 de 06/06/2022


Imagens meramente ilustrativas:



Matriz

+55 45 3039 4242
Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

+55 47 3439 2114
BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC
medixbrasil.com.br    medixbrasil

